


TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

LEPU TEST




1 Vydezinfikuješ si ruce

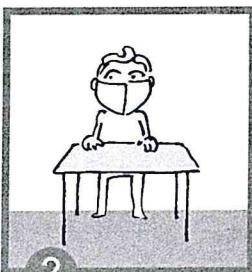


2 Posadíš se ke stolu




3 Dostaneš instruktáž

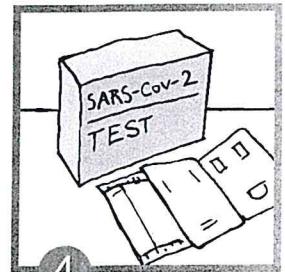


4 Rozbalíš si test

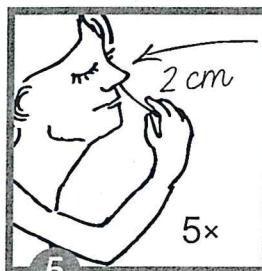

5 Tyčinkou 5x otočíš v každé nosní dírce

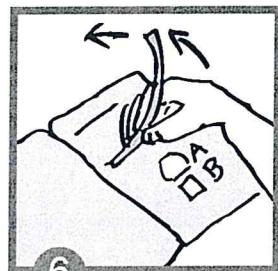


6 Odstraniš fólii z testu

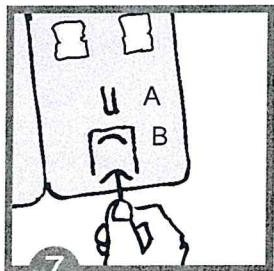


7 Prostrčíš konec tyčinky otvorem B do A




8 Test se zakape roztokem

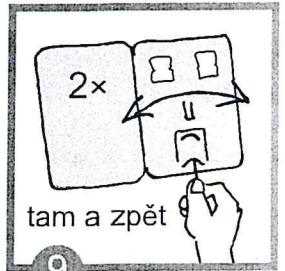


9 Otočíš 2x tyčinkou tam a zpět

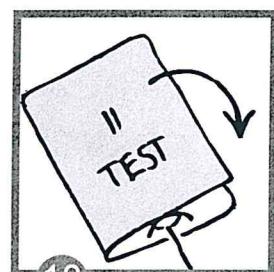


10 Zavřeš test

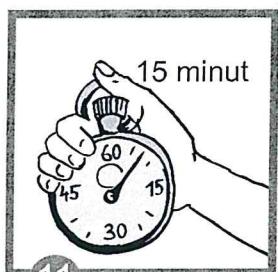

11 Stopujeme 15 minut

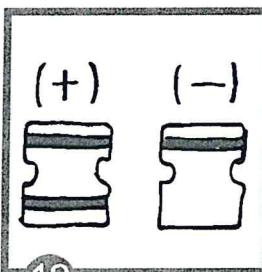

12 A máš tu výsledek

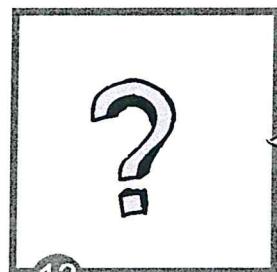


13 Ukazuje to něco jiného? Výsledek se zaznamená
test je neplatný, musíš se otestovat znovu




14



15 Test vyhodíš a vydezinfikuješ si ruce

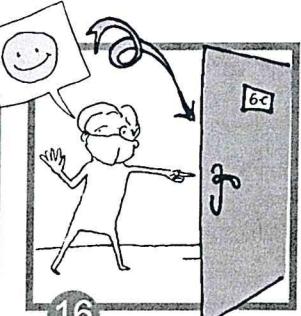

16 Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními

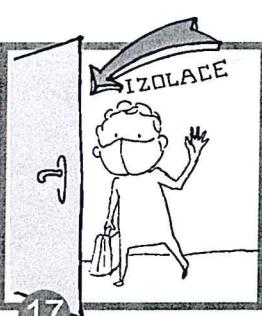

17 Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jdete domů



18 Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

npi | Národní pedagogický institut
České republiky